


VBM Guide « de poche »

Le guide « de poche » est une aide lors d'une intubation difficile, permettant de faciliter l'introduction de la sonde endo-trachéale directement lors d'une laryngoscopie ou grâce à un vidéo-laryngoscope.

- Conditionnement réduit du guide. Replié à 20 cm, dépliable à 65 cm en 3 clics et prêt à l'emploi en quelques secondes
- Encombrement optimum pour les sacs d'urgences, les ambulances, hélicoptères, poches de blouses, chariots d'urgence, etc ...
- Pour sondes endo-trachéales > ou = à 6 mm
- Usage unique, stérile

CARACTERISTIQUES

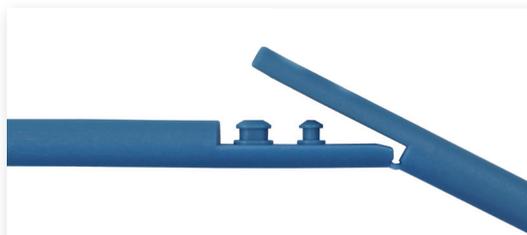


Charnières

Dépliable à 65 cm en 3 clics et prêt à l'emploi en quelques secondes



« Clics connections »

Les « clics connections » sont définitives, le guide ne peut être replié

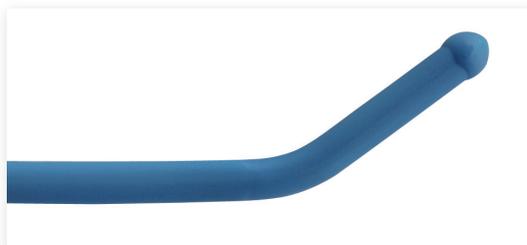

Extrémité


Préformé et olivaire, l'extrémité est atraumatique et ne peut blesser la muqueuse trachéale




grandeur nature 1:1




APPLICATION

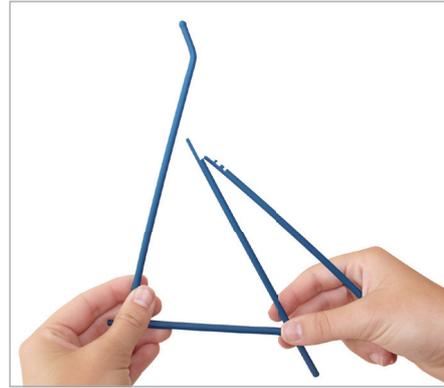

Déplier

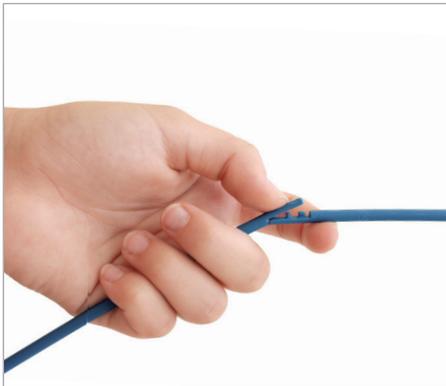


Presser fermement ensemble toutes les charnières

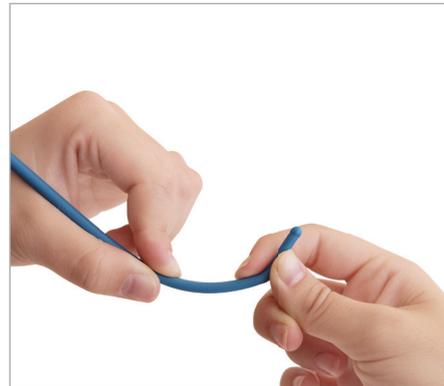

Si nécessaire courber la partie distale



Insérer dans la trachée

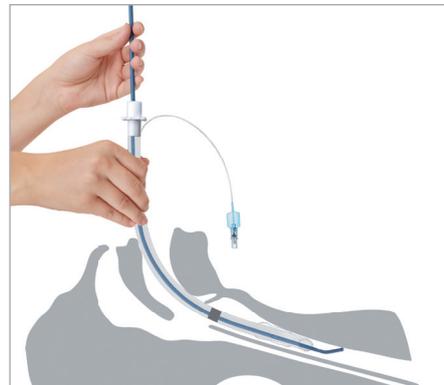

Faire coulisser la sonde ET sur le guide

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Guide « de poche »
Emballé stérile

Taille	Longueur	pour sonde ET	REF	boîte
15 CH	65 cm	≥ 6,0 mm	33-80-650-1	5

Dans une coque plastique rigide

Taille	Longueur	pour sonde ET	REF	boîte
15 CH	65 cm	≥ 6,0 mm	33-81-650-1	1



VBM France sarl

ZAC de la Ferrage | Avenue Maréchal Leclerc | 13980 Alleins | France

Tél: 04 42 46 79 53 | Fax: 04 42 46 79 54 | e-mail: info@vbm-medical.fr | www.vbm-medical.fr



0123

P349-1.0FV/09.13